



Para uso Veterinário

Celltac $\alpha$

Manutenção corretiva

MEK-6550J/K

## Equipamento MEK-6550 (Celltac Alpha) Uso Veterinário

### Problemas com WBC, RBC, HGB, PLT e 3DIFF

1. Realizar a STRONG CLEAN: MENU INICIAL > OPERATION > STRONG CLEAN.

### Se identificar a passagem de coágulo no equipamento

1. Realizar o REMOVE CLOG: MENU INICIAL > OPERATION > REMOVE CLOG.
2. Realizar a STRONG CLEAN: MENU INICIAL > OPERATION > STRONG CLEAN.

### Se solicitar a troca de filtros, tubo da bomba, agulha de amostragem, cap-piercing e demais consumíveis

1. Avaliar fisicamente se há a necessidade de troca dos consumíveis. Caso não haja entrar na tela MENU INICIAL > OTHER > OPER HISTORY > NEXT (segunda e terceira página) > realizar o RESET dos consumíveis que excederam a quantidade de ciclos.