



Celltac *ES*

Manutenção corretiva

MEK-7300K

Problemas com WBC, RBC, HGB e PLT

1. Realizar a STRONG CLEAN: MENU INICIAL > OPERATION > STRONG CLEAN.

Problemas com diferencial de leucócitos

1. Realizar a CLEAN FLOWCELL: MENU INICIAL > OPERATION > CLEAN FLOWCELL.

Se identificar a passagem de coágulo no equipamento

1. Realizar o REMOVE CLOG: MENU INICIAL > OPERATION > REMOVE CLOG.
2. Realizar a STRONG CLEAN: MENU INICIAL > OPERATION > STRONG CLEAN.

Se solicitar a troca de filtros, tubo da bomba, agulha de amostragem, cap-piercing e demais consumíveis

1. Avaliar fisicamente se há a necessidade de troca dos consumíveis. Caso não haja entrar na tela MENU INICIAL > SYSTEM > USER MAINT > Correr para segunda página > marcar a caixa de seleção dos consumíveis que excederam a quantidade de ciclos > RESET.